

WIDR® ME KURZANLEITUNG

1. Setzen Sie den Benutzer auf einen feststehenden Stuhl (keinen Drehstuhl) innerhalb des festgelegten Spielbereichs.
2. Nehmen Sie das VR-Headset und beide Controller aus der Ladestation.
3. Erklären Sie dem Benutzer, dass er an einer Erfahrung teilnehmen wird, bei der seine visuelle Strategie gemessen wird, um ein personalisiertes Glasdesign zu erstellen.
4. Erklären Sie, dass er als Erstes einen blauen Punkt sehen wird, den er anschauen muss.
5. Setzen Sie dem Benutzer das VR-Headset auf.
6. Stellen Sie das Hinterkopfkissen mit dem hinteren Rad ein.
7. Weisen Sie den Benutzer an, das Headset wie ein Fernglas zu halten und es vertikal anzupassen, um die bestmögliche Sicht zu erzielen. Befestigen Sie in dieser Position den oberen Riemen mit dem Klettverschluss.
8. Erklären Sie dem Benutzer, dass es sich hierbei nicht um einen Test mit richtigen oder falschen Antworten handelt, sondern dass er sich einfach entspannen und den Anweisungen folgen muss, die er hört.
9. Sobald der Benutzer entspannt ist, geradeaus schaut und mit dem Rücken richtig am Stuhl anliegt, drücken Sie die Taste, um den Test zu starten (Taste A).
10. Legen Sie die Controller umgedreht auf eine ebene und stabile Oberfläche.
11. Bleiben Sie zumindest so lange in der Nähe des Benutzers, bis er die Starttaste gedrückt hat, falls er Hilfe benötigt oder die Anweisungen nicht richtig befolgt.
12. Wenn die Erfahrung beendet ist, nehmen Sie dem Benutzer das VR-Headset vom Kopf.
13. Überprüfen Sie die Messergebnisse auf der Website, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist, und erklären Sie dem Benutzer den Bericht.